



LE DÉPARTEMENT DE L'EURE MET À VOTRE DISPOSITION CE MASQUE EN TISSU RÉUTILISABLE


Ce masque en tissu « grand public » de catégorie 1 est :

- conforme à la réglementation AFNOR
- certifié par le Ministère des Armées
- lavable 100 fois



- Même quand vous portez un masque, il est essentiel de respecter les gestes barrières et de pratiquer la distanciation sociale.
- Il ne faut pas porter ce masque plus que 4 heures. Au-delà de 4 heures, changez de masque.

Recommandations d'utilisation

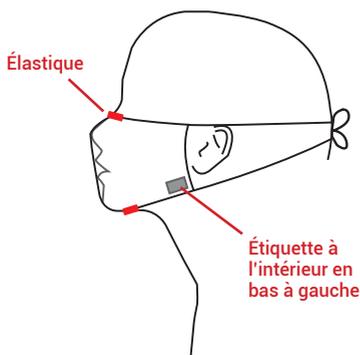

Avant utilisation

Lavez-vous les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique.

En mettant le masque

Ne touchez pas l'intérieur du masque avec les doigts.

Pour enlever le masque

Ne touchez pas le devant du masque. Enlevez-le uniquement par les rubans.

Pour laver ce masque en machine :

- Utilisez un programme d'au minimum 30 minutes à 60°C Max.
- Le masque barrière ne doit pas sécher à l'air libre. Vous pouvez le mettre au sèche-linge ou le sécher à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Effectuez un repassage à une température de 120°C ou 130°C.
- Vérifier le masque après chaque lavage. Si vous trouvez l'état du masque détérioré (déformations, usure, déchirure, etc.), le masque barrière doit être jeté.
- La décoloration ne constitue pas une détérioration du masque.



Pour plus d'informations flashez ce QR Code ou rendez-vous sur eureennormandie.fr



Spécifications : MASQUE CAT. 1 UNS : VSG2-94
Composition : 65% Polyamide, 35% coton organique fil GOTS.